

RDI 设置参考指南

RDI按键可以出现的位置：




基本功能界面



自定义功能界面



功能列表

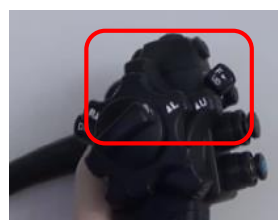


内镜遥控按钮


RDI模式设置方法：



1、点击设定按钮

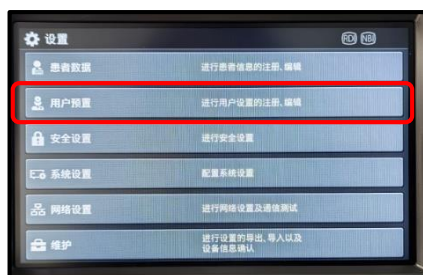

2、选择用户预置

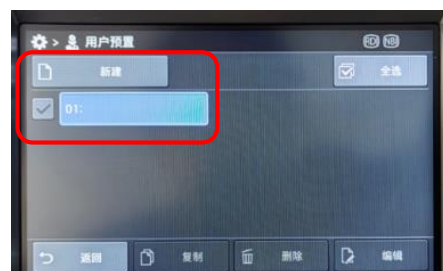

3、新建/编辑 用户预置



4、进入编辑菜单后点击左侧“向下”按钮，找到RDI图像调整，点击按钮进入



5、点击亮度、色调等参数的“+/-”按钮调节参数



6、调节完相关参数，点击保存按钮确认调整参数。



RDI 设置参考指南

RDI模式的区别:

	Mode 1 (推荐)	Mode 2	Mode 3
特点	出血点的观察 深层血管用深橙色表示	比Mode1更强调红色 深层血管用红色表示	深层血管用绿色 表层血管用红色
有用性	出血点确认 <ul style="list-style-type: none"> 治疗中的出血 可快速进行止血操作,防止大咯血 (RE) ESD和POEM肌层边界确认 (GI) 	深层血管确认 <ul style="list-style-type: none"> ESD和POEM初期局部注射深层血管确认 (GI) 食管静脉曲张深度和发红确认 (GI) 	深层+表层血管确认 <ul style="list-style-type: none"> 溃疡性结肠炎的验证确认 (GI)
内镜图像			

注意事项:

1. CV1500的RDI观察模式不支持180/260以及更早型号的内镜。
2. RDI观察模式下, AGC功能禁止使用。
3. RDI观察模式下, 不能切换图像强调模式。
4. RDI观察模式下, 不能打开电子快门。
5. RDI观察模式下, 内镜检查图像有大量噪点, 可能是AGC设置太强导致。
6. 超声内镜遥控按钮不能设置成RDI观察模式。



OLYMPUS

智能服务 扫码报修

400-820-2084