

BAI-MAC 使用参考指南

BAI-MAC按键可以出现的位置：




基本功能界面



自定义功能界面



功能列表

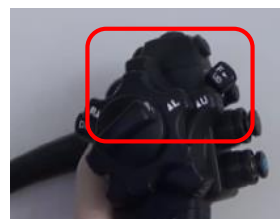

内镜遥控按钮

BAI-MAC使用注意事项：

1、TXI功能ON时，内部BAI-MAC功能自动变为ON，所以在TXI功能打开时，BAI-MAC功能键无法进行ON/OFF切换。



2、RDI观察模式时，BAI-MAC功能会造成图像的噪点会恶化，因此在RDI模式下，BAI-MAC功能无法进行ON/OFF切换。

RDI模式下无BAI-MAC功能

NBI模式下有BAI-MAC功能

