

# MyCV Mode 设置参考指南

## MyCV Mode按键可以出现的位置：



基本功能界面

自定义功能界面

功能列表

内镜遥控按钮

## MyCV Mode设置方法：



1、点击设定按钮

2、用户设定

3、新建/选择用户

4、选择左侧的MyCV Mode，并点击编辑

5、勾选需要设置的内容，并在下拉菜单中进行设置

6、全部设置完成后点击“确定”

7、点击“保存”完成用户设置




## MyCV Mode 设置参考指南

### 注意事项一：

在MyCV Mode中，图像强调和TXI设置是在同一个选项框内的，因此，如果观察光选择了NBI/RDI/AFI，切记不能设置TXI模式。

如果在观察模式中选择除白光以外的观察光模式，又在图像强调/TXI选项内选择了TXI模式，在使用MyCV Mode功能时会出现报错警示。

TXI只能在白光模式下可以使用。

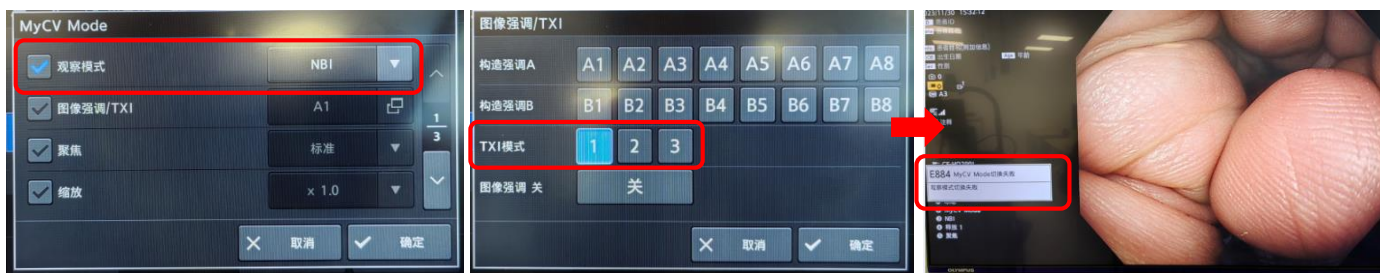

### 注意事项二：

MyCV Mode设置不会区分所使用的内镜。

因此如果在设置中设置了聚焦功能，但实际使用中未使用带聚焦功能的内镜，也会出现报错提示。

