

TXI 设置参考指南

TXI按键可以出现的位置：



基本功能界面



自定义功能界面



功能列表



内镜遥控按钮


TXI模式设置方法：



1、点击设定按钮



2、选择用户预置

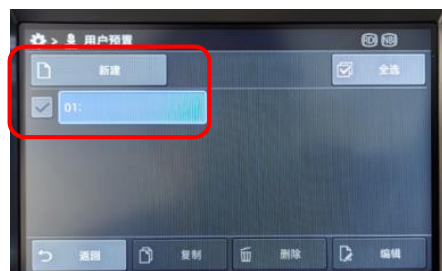


3、新建/编辑 用户预置




4、进入编辑菜单后点击左侧的“向下”按钮



5、进入菜单第4页，选择“WLI图像调整”，点击右侧“向下”按钮

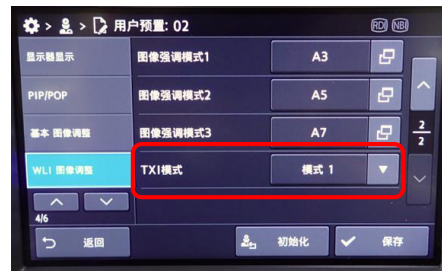

6、选择菜单第2页最下方的“TXI模式”选项右侧的“向下”按钮

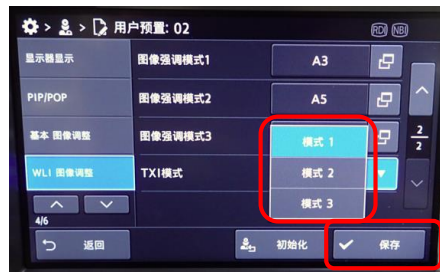

7、在下拉菜单中选择需要的模式后，点击“保存”完成用户设置

