

# CV-1500 快速参考指南

## 开机，连接内镜

Step1: 将内镜接头插入图像处理装置前面板上的输出插口，直到咔嗒入位。



Step2: 按下图像处理装置的电源开关，电源指示灯亮灯，直到设备完全开启。



## 白平衡操作流程


Step1: 根据连接的内镜类型，安装白平衡帽。

a) 直视型：按如下所示握住内镜先端。

- 将内镜先端插入白平衡帽（MH-155）0–25 mm。
- 监视器上完全显示白色画面，没有任何白色瑕疵。

b) 侧视型：按如下所示握住内镜先端。

- 将内镜先端插入白平衡帽（MH-155）。
- 监视器上完全显示白色画面，没有任何白色瑕疵。

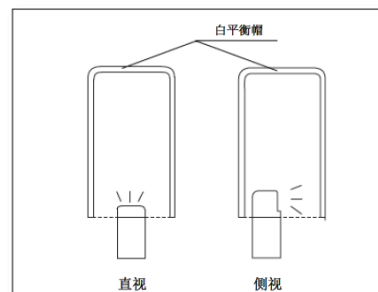

Step2: 握住内镜，静止不动，然后按住主界面>基本功能上的“白平衡”按钮，直到状态变为“完成”。



OLYMPUS

智能服务 扫码报修

400-820-2084

# CV-1500 快速参考指南

## 取下内镜

Step1: 轻点主界面上的“取下内镜”按钮。




Step2: 轻点“是”按钮。



Step3: 直到显示提示准备就绪的消息时，取下内镜。



注意: 使用 180/260 系列内镜时，“取下内镜”按钮无效。如果关闭了外部图像处理装置，则可以取下内镜，无须关闭本设备的电源开关。

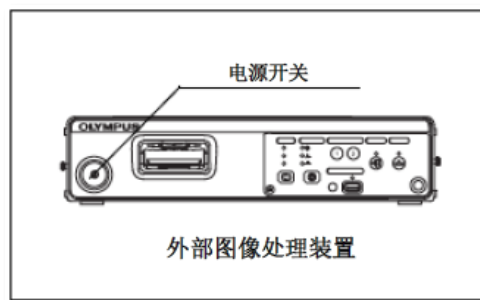

OLYMPUS

智能服务 扫码报修

400-820-2084