

# CV-1500 遥控按钮功能 设置参考指南

## 内镜遥控按钮功能 设置方法：



1、点击设定按钮



2、选择用户预置



3、新建/选择用户



4、选择左侧的“下”并点击



5、左侧会显示出对应的遥控按钮区域



6、点击左侧对应的遥控按钮区域



7、点击右侧区域，对按钮1功能进行设置



8、选择需要设置的功能，并点击“确定”



9、设置完毕后，点击“保存”

## 注意事项：



在设置按钮时，可以同时设置4种类型按钮，分别是：  
 常规4按键内镜（4SW），常规5按键内镜（5SW），  
 超声4按键内镜（4SW US），超声5按键内镜（5SW US）  
 按钮功能设置完毕后，当插入不同类型内镜，系统会自动识别内镜类型并调取相应按钮设置，无需手动进行选择

